

# 亮視™ 隱形眼鏡潤濕液

## REFRESH CONTACTS®

### Contact Lens Care Sterile Solution

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

衛署醫器輸字第014180號

適合所有隱形眼鏡配戴者使用

亮視™ 隱形眼鏡潤濕液可濕潤隱形眼鏡，為各式隱形眼鏡配戴者帶來舒緩效果以及舒適感，獨特配方可緩解因微塵、眩光、花粉、空氣污染或過度工作所引起的乾澀和刺激感，提供配戴隱形眼鏡者全天候的舒適感。

#### 使用方法

- 戴著隱形眼鏡時，可滴一至二滴至鏡片上。
- 需要時即可使用。
- 不需要將隱形鏡片取出。
- 如需加倍的舒適感，可在配戴隱形眼鏡前，在每片鏡片各滴一至二滴。

#### 注意事項

- 對本品任一種成分過敏者，請勿使用本品。
- 請勿吞服本品。
- 為了防止污染，本品滴管頂端不要碰觸到任何表面，並避免於眼睛直接接觸。
- 使用後，應立即將瓶蓋旋緊。
- 開瓶後應於60天內用完。
- 切勿於標示之有效期限後使用。
- 置於孩童不能碰及之處。
- 室溫下儲存。

如果仍持續有這方面的問題，請諮詢驗光師。

#### 內容物

Sodium Carboxymethylcellulose 0.5%

PURITE™ 0.005%

#### 包裝

本品為無菌溶液，15ml塑膠瓶裝。

CE 0050

 ALLERGAN

製造廠

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road, Westport

County Mayo, Ireland

藥商

香港商愛力根有限公司台灣分公司

台北市羅斯福路二段102號9樓

